

DA

GC Aligner Connect

LYSHÆRDET, INJICERBART KOMPOSIT TIL FASTGØRELSE AF SKINNER

Må kun anvendes af tandlægefagligt personale i henhold til de anbefalede indikationer.

INDIKATIONER FOR BRUG

Opbygningsmateriale til transparente, aftagelige skinner

KONTRAINDIKATIONER

Undgå brug af dette produkt på patienter med kendte allergier over for metakrylatmonomer eller metakrylatpolymer.

BRUGERVEJLEDNING

A. KLARGØRING AF TÆNDERNE

1. Rengør tandfladerne, der skal limes, med pimpsten og vand. Skyl grundigt med vand. Tør ved forsigtigt at blæse med oliefri luft.
2. Bindingsbehandling. Brug et lyshærdende bindingssystem (f.eks. G-Premio BOND) til at binde GC Aligner Connect til emaljen og/eller dentinen. Følg anvisningerne fra producenten af bindemidlet.

Bemærk:

Hvis den overflade, hvorpå der skal limes, indeholder porcelæn, zirkonia, metal eller komposit, skal den behandles i overensstemmelse hermed. Porcelæn og komposit skal sandblæses og forbehandles med silan. Zirkonia og metal skal sandblæses. Se vejledningen fra producenten af klæbemidlet/primeren.

B. PLACERING AF GC Aligner Connect PÅ OVERFØRSELBAKKEN


1. Hold sprøjten lodret, og fjern hættten ved at dreje den mod uret (fig. 1).
2. Sæt straks doseringsspidsen sikkert fast på sprøjten ved at dreje den med uret.

Bemærk:

Sørg for, at doseringsspidsen ikke sættes for stramt på.

Dette kan ødelægge gevindet. Sørg for, at der ikke sikker restmateriale i gevindet, så den kan sluttet helt tæt.

3. Sæt den lysbeskyttende hætte på spidsen, indtil den skal bruges.

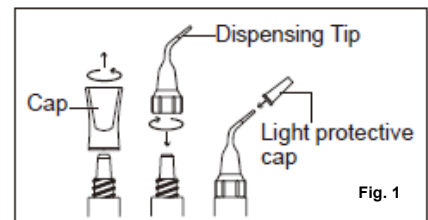


4. Fjern hættten fra doseringsspidsen.

Bemærk:

Før materialet dispenseres i overførselsbakken, skal følgende kontrolleres:

- Doseringsspidsen er sikkert fastgjort på sprøjten.
- Eventuel luft fra doseringsspidsen fjernes ved forsigtigt at skubbe sprøjtestemplet fremad med spidsen opad, indtil materialet når spidsens åbning (fig. 2).

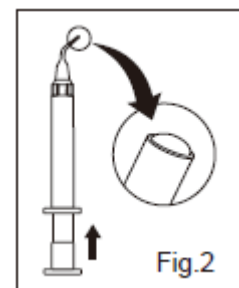

5. Anbring doseringsspidsen så tæt som muligt på overførselsbakken, og skub langsomt stemplet, så materialet presses ud.

Bemærk:

- Hvis doseringsspidsen er tilstoppet, fjernes den, og der presses en lille smule af materialet ud direkte fra sprøjten.
- Minimer eksponering for omgivende lys. Omgivende lys kan forkorte arbejdstiden.
- Efter brug fjernes og kasseres doseringsspidsen med det samme, og sprøjten lukkes tæt med hættten.
- Brug ikke en uigennemsiagtig overførselsbakke. Dette kan forårsage uhærdet/ufuldstændig polymerisation af resinet efter lyshærdning.

Kliniske tip

For at injicere effektivt skal det sikres, at hele overfladen, som fastgørelsen skal sidde på, er ensartet under opbygningen. Når den nødvendige mængde er injiceret, mindskes trykket på stemplet, og sprøjten trækkes tilbage vinkelret på overfladen. Det gør det muligt for materialet at slippe doseringsspidsen og giver fastgørelsen en glat overflade.

C. OPBYG FASTGØRELSER PÅ TÆNDERNE

- Anbring overførselsbakken i mundhulen.
- Lyshærd GC Aligner Connect på hvert fastgørelsesområde med en LED hærdelampe (10 sek.: LED med høj effekt $>1200 \text{ mW/cm}^2$, 20 sek.: Halogen/LED, $>700 \text{ mW/cm}^2$). Hold lyset så tæt som muligt på materialet fra GC Aligner Connect.

Hærdelampe og bestrålingstid

Hærdelampe	Bestrålingstid
LED med høj effekt (mere end 1200 mW/cm^2)	10 sek.
Halogen/LED ($700\text{-}1200 \text{ mW/cm}^2$)	20 sek.

- Fjern overførselsbakken fra mundhulen.
- Afslut og polér efter behov ved brug af standardteknikker.

D. FJERN FASTGØRELSEN

Når tandlægebehandlingen ikke længere kræver fastgørelsen, fjernes den med et diamantbor eller silikonespids.

NUANCE

A2

OPBEVARING

For at sikre optimal funktion skal produktet opbevares køligt og mørkt (4-25 °C), og det må ikke udsættes for høje temperaturer og direkte sollys.

PAKNING

1. Sprøjte 3,4 g (2,0 ml) x 1, DOSERINGSSPIDSER III (plast) x 20, lysbeskyttende hætte x 1
2. Ekstra doseringsspids: 30 DOSERINGSSPIDSER III (plasttype), 2 lysbeskyttende hætter
30 DOSERINGSSPIDSER III (nåletype), 2 lysbeskyttende hætter

FORSIGTIG

1. Undgå at få materiale på tøjet.
2. Doseringsspidsene er kun til brug på én patient. For at undgå krydskontaminering mellem patienter må doseringsspidsen ikke genbruges. Doseringsspidsen kan ikke steriliseres i en autoklave eller en kemiklave.
3. Bortskaf alt affald i henhold til lokale regler.
4. Må ikke blandes med andre lignende produkter.
5. Brug ikke dette produkt i kombination med eugenolholdige materialer, da eugenol kan hindre dette produkt i at størkne.
6. Tør ikke doseringsspidsen af med for meget alkohol, da det kan forurene pastaen.
7. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med vand, og der søges lægehjælp.
8. I tilfælde af kontakt med oralt væv eller hud skal det straks fjernes med vat eller en svamp, der er gennemvædet med alkohol. Skyl med vand. Undgå kontakt. Brug en gummiafdækning og/eller KAKAOSMØR til at isolere operationsområdet fra hud eller oralt væv.
9. I sjældne tilfælde kan produktet medføre overfølsomhed hos visse mennesker. Hvis sådanne reaktioner optræder, skal anvendelsen af produktet ophøre, og patienten skal opsøge en læge.
10. Brug altid personligt sikkerhedsudstyr, som f.eks. handsker, ansigtsmasker og sikkerhedsbriller.
11. Før fyldningsprocessen påbegyndes, skal du delvis ekstrudere pasta uden for patientens mund og væk fra patienten for at sikre, at pastaen flyder korrekt.
12. Undgå indtagelse af materialet.

13. Bær plastik- eller gummihandsker under anvendelse for at undgå direkte kontakt med luftthæmmede resinlag for at forhindre eventuel overfølsomhed.
14. Bær beskyttelsesbriller under lyshærdningen.
15. Når det polymeriserede materiale skal poleres, skal der anvendes en støvopsamler, og der skal bæres støvmaske for at undgå indånding af skærestøv.
16. Vær opmærksom på ikke at overfylde overførselsbakken med for meget pasta, så pastaen flyder ud, når overførselsbakken anbringes i mundhulen. Hvis pastaen flyder ud og kommer i kontakt med utilsigtede områder som f.eks. tandkød, skal du fjerne overførselsbakken før lyshærdning og fjerne materialet med et instrument, en svamp eller en vatpind og starte forfra fra trinnet med rensning af tandoverfladen.

Senest revideret: 05/2021

Please translate the text in the Fig.1 illustration as well.

Hætte

Doseringsspids

Lysbeskyttende hætte

